

Actimove® Cervical Plus

Collier cervical semi-rigide C2 et C1

- Insert rigide amovible pour un soutien renforcé
- Mousse semi-ferme anatomique préformée
- Housse supplémentaire en coton



En indication...

- Limite la mobilité du cou
- Syndrome cervical douloureux, aigu ou chronique
- Courbature
- Arthrite cervicale
- Névralgie cervicobrachiale
- Entorse cervicale mineure
- Sevrage progressif de collier cervical rigide

En plus...

- Fermeture et réglage simples grâce à la large bande auto-agrippante postérieure
- Lavable en machine à 30°C
- Coloris bleu


Mise en place

- 1 - L'insert frontal rigide peut être appliqué ou retiré selon le degré de soutien désiré grâce à ses fixations auto-agrippantes.
- 2 - Placer le collier devant le cou et faire reposer le menton dans la découpe prévue à cet effet.
- 3 - Enrouler le collier autour du cou et fermer les attaches adhésives.
- 4 - L'enveloppe coton protège le collier cervical et préserve l'hygiène du patient.



Actimove® Cervical Plus

Taille	Hauteur	Circonférence	Code produit	ACL**	EAN13
S	7,5 cm	31-36 cm	76265-00	-	4042809490374
M	7,5 cm	37-42 cm	76265-01	-	4042809490367
L	7,5 cm	43-48 cm	76265-02	-	4042809490350
S	9 cm	31-36 cm	76265-03	-	4042809490343
M	9 cm	37-42 cm	76265-04	-	4042809490336
L	9 cm	43-48 cm	76265-05	-	4042809490329
S	10,5 cm	31-36 cm	76265-06	-	4042809490312
M	10,5 cm	37-42 cm	76265-07	-	4042809170023
L	10,5 cm	43-48 cm	76265-08	-	4042809117677

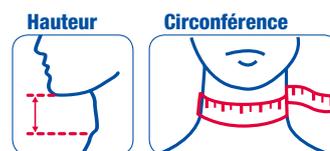

Conforme LPPR 2139009
 Tarif de remboursement : 13,10 €
 (tarif susceptible de modification)

Actimove® Cervical

Colliers cervicaux semi-ferme ou ferme pour soutien léger (C1)

- **Forme anatomique préformée en mousse :**
stabilité de la découpe pour un plus grand confort
- **Housse en coton supplémentaire :** hygiène et confort du patient
- **6 tailles disponibles :** produits adaptés à un large nombre de patients

En plus...

- Existe en version ferme ou semi-ferme
- Fermeture et réglage simples grâce à la large bande auto-agrippante postérieure
- Lavable en machine à 30°C : pratique et hygiénique
- Coloris blanc

Mise en place


1. Placer le collier devant le cou et faire reposer le menton dans la découpe prévue à cet effet.
2. Enrouler le collier autour du cou et fermer à l'aide de l'attache.



aussi pour les juniors !

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63

Taille	Hauteur	Circonférence	Code produit	ACL**	EAN13
Mousse semi-ferme					
XS	6,5 cm	26 - 33 cm	73421-02	7843612	4042809016062
S	7,5 cm	30 - 36 cm	73421-03	7843629	4042809016093
M	9 cm	33 - 39 cm	73421-04	7843635	4042809016123
L	10 cm	36 - 42 cm	73421-05	7843641	4042809016154
XL	11 cm	39 - 45 cm	73421-06	7843658	4042809016185
XL court	7 cm	38 - 48 cm	73421-07	7843664	4042809016215
Mousse ferme					
XS	6,5 cm	26 - 33 cm	73421-08	7844190	4042809016246
S	7,5 cm	30 - 36 cm	73421-09	7844209	4042809016277
M	9 cm	33 - 39 cm	73421-10	7844215	4042809016307
L	10 cm	36 - 42 cm	73421-11	7844221	4042809016338
XL court	7 cm	38 - 48 cm	73421-12	7844238	4042809016369

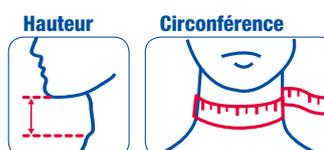

Pour les 2 colliers

En indication...

- **Curatif :**
 - Traumatismes légers du rachis cervical, torticolis, cervicarthrose
- **Préventif :**
 - Port conseillé durant de longs trajets (voiture, train, avion...)



Conforme LPPR 2118823

Tarif de remboursement : 9,25 €
(tarif susceptible de modification)

Actimove® CerviRoll

Rouleau de mousse semi-ferme à découper pour la confection de colliers cervicaux (C1)

- **Rouleau de 4 m de bande mousse semi-ferme fourni avec 2 m de bande auto-agrippante**
 - découpe à la longueur adaptée au patient
 - réalisation de 8 à 10 colliers cervicaux
- **Livré en boîte distributrice : facilité d'utilisation**

En plus...

- Existe en 3 hauteurs : 7 cm (taille S) ; 9 cm (taille M) ; 11 cm (taille L)
- Lavable en machine à 30°C : pratique et hygiénique

Mise en place

1. Mesurer le tour et la hauteur du cou du patient pour déterminer la longueur et la hauteur à utiliser.

Ajouter 8 cm à la mesure de tour de cou pour réaliser la découpe.

2. Placer le collier autour du cou et fermer à l'aide de l'attache en velcro livrée avec le rouleau (environ 20 cm).

Taille	Hauteur	Code produit	ACL**	EAN13
S	7 cm	73421-13	4448631	4042809165623
M	9 cm	73421-14	4448648	4042809165630
L	11 cm	73421-15	4448654	4042809165647

