


**INNOVATION
PATIENT
BREVETÉE**

Actimove® Gilchrist Smart

Echarpe d'immobilisation de l'épaule et du bras « coude au corps », une seule pièce

Une révolution pour le patient :

- Chaque jour, le patient s'habille seul en Gilchrist Smart, évitant les mouvements superflus, source de douleurs, facilement et rapidement.
- S'enfile comme une chemise
- Une seule fermeture à l'avant, verrouillée par un clic, réglages de sangles à l'avant, le tout d'une seule main !
- Blocage d'épaule sûr et particulièrement confortable
- Support d'avant-bras :
 - Fermé : stabilise le poignet en laissant les mouvements des doigts libres.
 - Ouvert : libère le poignet, facilite le soin et la rééducation de l'avant-bras.

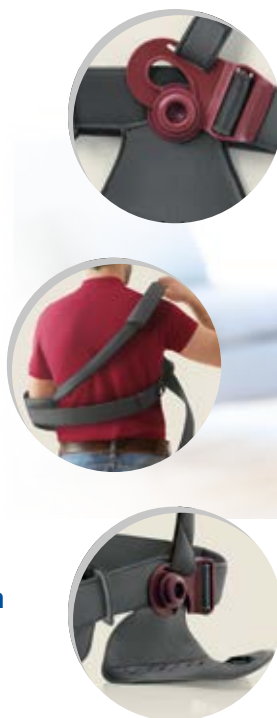

En indication...

- Pour une immobilisation post-opératoire après une luxation, une entorse, une lésion de la coiffe des rotateurs, une fracture de l'omoplate, une fracture sous-capitale de l'humérus et une fracture de la diaphyse humérale.
- Pour traiter la fibromyalgie
- En cas d'instabilité mineure de l'épaule.


En plus...

- Conception ouverte : accès à l'épaule lésée
- Sans latex
- Lavable en machine à 30°C : pratique et hygiénique

Actimove® Gilchrist Smart

Taille	Tour de poitrine	Code produit	ACL**	EAN13
S droit	70-90cm	76241-06	-	4042809484328
S gauche	70-90cm	76241-07	-	4042809484342
M droit	90-110cm	76241-08	-	4042809484366
M gauche	90-110cm	76241-09	-	4042809484380
L droit	110-130cm	76241-10	-	4042809484403
L gauche	110-130cm	76241-11	-	4042809484427

Tour de poitrine

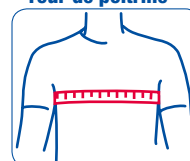

conforme
LPPR

Conforme LPPR 1156684

Tarif de remboursement : 15,24 €
(tarif susceptible de modification)

Une innovation brevetée, aussi facile à enfiler qu'une chemise !



1 - Passer votre main à travers l'ouverture de la poche du coude afin de placer le bras lésé, en veillant à ce que le rivet rouge soit face avant.



2 - Ensuite, passer votre bras sain derrière le dos pour attraper la sangle d'épaule.



3 - Placer ensuite la sangle par-dessus votre épaule comme pour enfiler une chemise. Le coussin de la sangle doit être placé sur votre épaule saine et la boucle doit se trouver à l'avant de votre corps.



4 - Fermer la boucle en attachant le crochet au rivet jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



5 - Pour un bon ajustement, régler la sangle ventrale et la sangle d'épaule pour que votre bras soit positionné à un angle de 90°

Après la première mise en place, les sangles restent réglées.



Réglée une fois pour toute à la première application !