



Actimove® LombaCare ActiveFit

Ceinture lombaire pour maintien postural actif

La première ceinture morpho-active

- Stimule activement pour soulager la douleur par pression dorsale différenciée

Actimove® LombaCare ActiveFit va plus loin

- Quatre coussins proprio-actifs à effet massage renforcent l'effet préventif anti-douleur

- Une pression dorsale différenciée est activée par le mouvement, elle stimule la sensation de bien-être.
- Conception inédite : L'élasticité intégrale et les baleines préformées à hauteur différenciée assurent un plus grand confort dans tous les mouvements, pour toutes les morphologies.

Innovation conseil

- Deux hauteurs et seulement 3 tailles
- Baleines préformées

Valorise et simplifie votre conseil !

*Brevet déposé



Actimove® LombaCare ActiveFit

| Taille | Tour de taille | Code produit | ACL** | EAN13 |
|-----------|----------------|--------------|-------|---------------|
| S (21 cm) | 70-90 cm | 76263-00 | - | 4042809490572 |
| M (21 cm) | 91-110 cm | 76263-01 | - | 4042809490558 |
| L (21 cm) | 111-130 cm | 76263-02 | - | 4042809490527 |
| S (26 cm) | 70-90 cm | 76263-03 | - | 4042809490497 |
| M (26 cm) | 91-110 cm | 76263-04 | - | 4042809490480 |
| L (26 cm) | 111-130 cm | 76263-05 | - | 4042809490473 |



En indication...

- Pour les lombalgies aiguës et chroniques, les douleurs lombaires liées à des problèmes dégénératifs, l'ostéoporose, l'ostéochondrose, la spondylite, la spondylarthrose, le syndrome facettaire et des instabilités lombaires (insuffisance musculaire et ligamentaire).
- Pour la rééducation post traumatique, une utilisation postopératoire après une intervention des disques intervertébraux
- Pour la prévention des microtraumatismes répétés

En plus...

- Plastron frontal de hauteur réduite
- Lavable en machine à 30°C : pratique et hygiénique

Mise en place

1. Centrer Actimove® LombaCare ActiveFit au bas du dos, à l'arrière. Elle est prise en main correctement lorsque le passe-main et l'étiquette sont côté main droite.
2. Glisser votre main droite dans le passe-main. Tirer les extrémités vers l'avant.
3. Placer la ceinture autour de l'abdomen en appliquant une légère tension. Éviter les plis dans le tissu sous la ceinture ou dans la ceinture elle-même.
4. Fermer à l'avant. Au besoin, mettre en place la seconde sangle à l'aide des passe-doigts. Si nécessaire, ajuster le maintien jusqu'à vous sentir confortablement maintenu.

Tour de taille



Hauteur 21 cm
Conforme LPPR 201E00.021
Tarif de remboursement : 47,19 €
(tarif susceptible de modification)



Hauteur 26 cm
Conforme LPPR 201E00.022
Tarif de remboursement : 55,86 €
(tarif susceptible de modification)

Actimove® LombaCare ActiveFit

Morpho-active et brevetée* !

Baleines préformées à hauteur différenciée

pour une adaptation morphologique

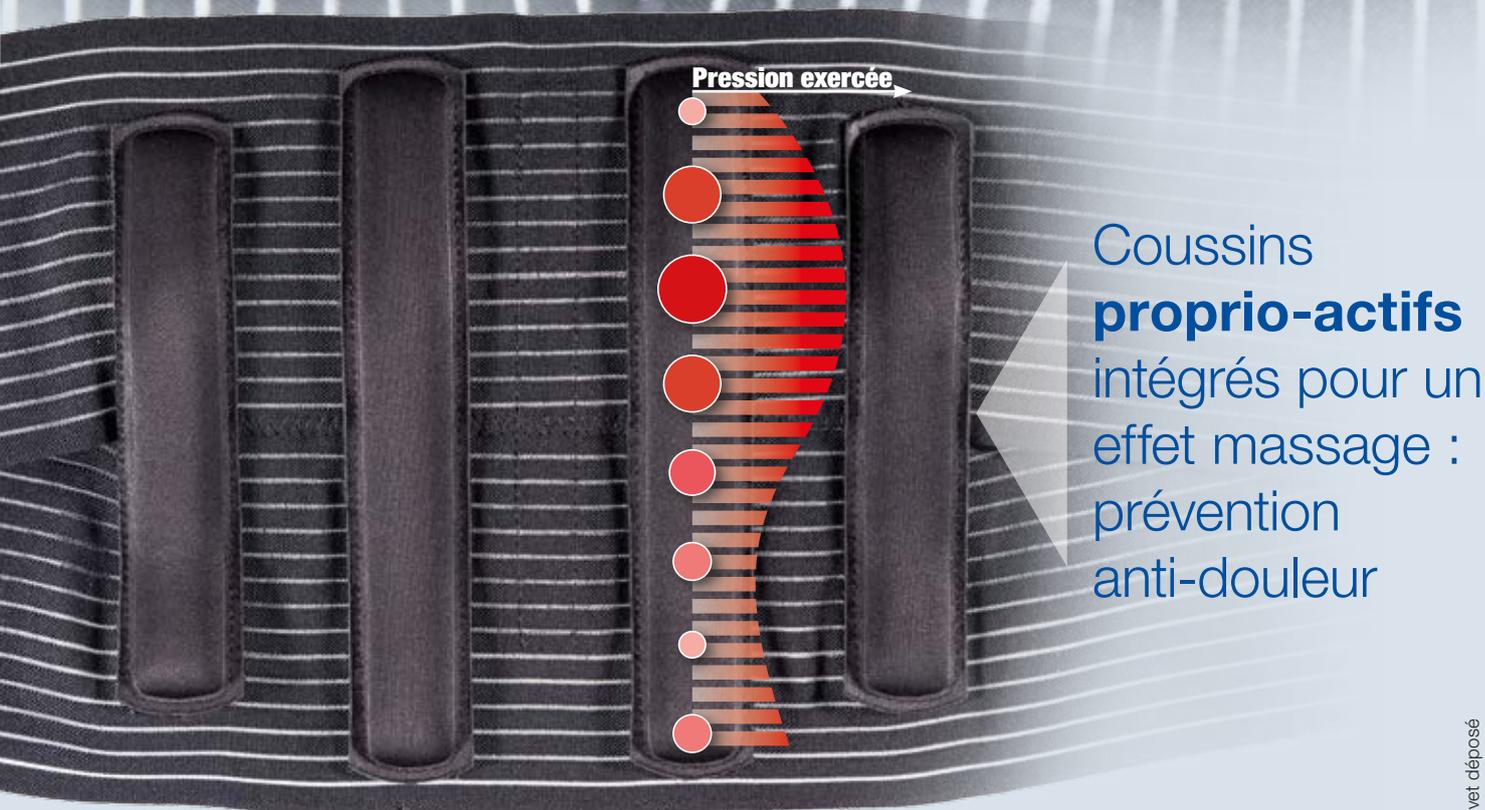


Illustration non contractuelle

*Brevet déposé



Ceinture à élasticité intégrale : maintien et confort dans toutes les postures



Double sangle pour un maintien renforcé et plastron à hauteur réduite pour plus de confort

Actimove® LombaCare Fine

Ceinture lombaire légère

- Peut se porter à même la peau
- Textile aéré et ceinture légère
- Découpe anatomique
- Disponible en 2 hauteurs :
21 cm et 26 cm et seulement 3 tailles



En indication...

- Pour les lombalgies aiguës et chroniques, les douleurs dorsales liées à des problèmes dégénératifs, l'ostéoporose, l'ostéochondrose, la spondylose, la spondylarthrose, le syndrome facettaire et des instabilités lombaires (insuffisance musculaire et ligamentaire).
- Pour la rééducation post traumatique, une utilisation postopératoire après une opération des disques intervertébraux et pour la prévention des microtraumatismes répétés.

En plus...

- Quatre baleines de renfort rigides, conformables, fines dans des goussets antiglisse
- Système de fermeture facile micro grip
- Sans latex
- Lavable en machine à 30°C : pratique et hygiénique




Mise en place

1. Centrer Actimove® LombaCare Fine au bas du dos, à l'arrière. Elle est prise en main correctement lorsque le passe-main est placé dans votre main droite.
2. Glisser votre main droite dans le passe-main. Tirer les extrémités vers l'avant.
3. Enrouler la ceinture autour de l'abdomen en appliquant une légère tension. Fermer à l'avant.
4. Si nécessaire, ajuster le maintien jusqu'à vous sentir confortablement maintenu.

Actimove® LombaCare Fine

| Taille | Tour de taille | Code produit | ACL** | EAN13 |
|-----------|----------------|--------------|-------|---------------|
| S (21 cm) | 70-90 cm | 76262-00 | - | 4042809490510 |
| M (21 cm) | 91-110 cm | 76262-01 | - | 4042809490541 |
| L (21 cm) | 111-130 cm | 76262-02 | - | 4042809490589 |
| S (26 cm) | 70-90 cm | 76262-03 | - | 4042809490534 |
| M (26 cm) | 91-110 cm | 76262-04 | - | 4042809490503 |
| L (26 cm) | 111-130 cm | 76262-05 | - | 4042809490565 |

Tour de taille

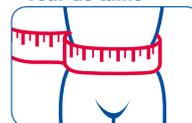

Hauteur 21 cm
Conforme LPPR 201E00.021
Tarif de remboursement : 47,19 €
(tarif susceptible de modification)



Hauteur 26 cm
Conforme LPPR 201E00.022
Tarif de remboursement : 55,86 €
(tarif susceptible de modification)

La plus légère des LombaCare

Poids plume et tissu aéré

- Baleines à hauteur différenciée à double enveloppe antiglisse

- Mise en place facilitée par passe-main et passe-doigt

