

Actimove® Tutor Pro

Attelle monobaleine 0° ou 20°

■ Conception brevetée

- Monobaleine à l'arrière, le seul modèle exclusif sans baleines latérales
- Coque ouverte : sans point de pression, se conforme à toutes les morphologies. Renforce la baleine arrière pour une immobilisation efficace
- Boucles de sanglage et coque monocorps : épousent la jambe et immobilisent parfaitement le genou, sanglage morphologique pour une efficacité anti-glisse améliorée

■ Une avancée pour l'immobilisation et le soin

- Conception inédite pour une parfaite immobilisation
- Visualisation et accès à l'articulation sans déposer l'attelle
- Taille universelle, coque livrée avec 2 baleines 0° ou 20°
- Radiotransparente

■ Confort du patient

- Attelle de conception inédite qui ne glisse pas
- Sanglage fermeture centrale : prise en main facilitée
- Coque ultra légère : jusqu'à - 50 % poids, plus facile à porter sous les vêtements



En indication...

- Immobilisation post-traumatique, post-opératoire en extension ou en flexion 20°.
- Suites de procédures d'arthroscopie, de ligamentoplastie.

Mise en place

1. Placer l'attelle de sorte que deux fermetures de sangle se situent au-dessus du genou et deux fermetures en-dessous. S'assurer que la jambe repose confortablement dans l'attelle.
2. En premier, fermer et régler la sangle sous la rotule. Le coussin additionnel sera positionné entre la sangle et la crête tibiale.
3. Ensuite, fixer et régler la sangle au dessus de la rotule.
4. Puis fixer et régler la sangle proximale (supérieure) de la cuisse.
5. Enfin, fixer et régler la sangle distale (inférieure) du tibia et placer le coussin additionnel entre la sangle et la crête tibiale.
6. Vérifier la tenue et la conformité anatomique de l'attelle. Se lever doucement et resserrer à nouveau les sangles si nécessaire pour garantir le meilleur ajustement.




Mesures



46-70 cm

31-45 cm

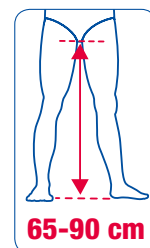

65-90 cm



max. 100 kg

Actimove® Tutor Pro

Taille	Carton std	Code produit	ACL**	EAN13
Universelle	4	74486-01	9905004	4042809397963
Hauteur 50 cm				

L'attelle est livrée avec sa coque et les deux modèles de baleines pour une immobilisation à 0° ou à 20° de flexion. Baleine 0° prémontée.




Conforme LPPR 2124338

Tarif de remboursement : 57,23 €
(tarif susceptible de modification)

L'innovation patient pour l'immobilisation du genou

Une attelle monobaleine 0° ou 20°, taille universelle

En pratique,
La préparation...

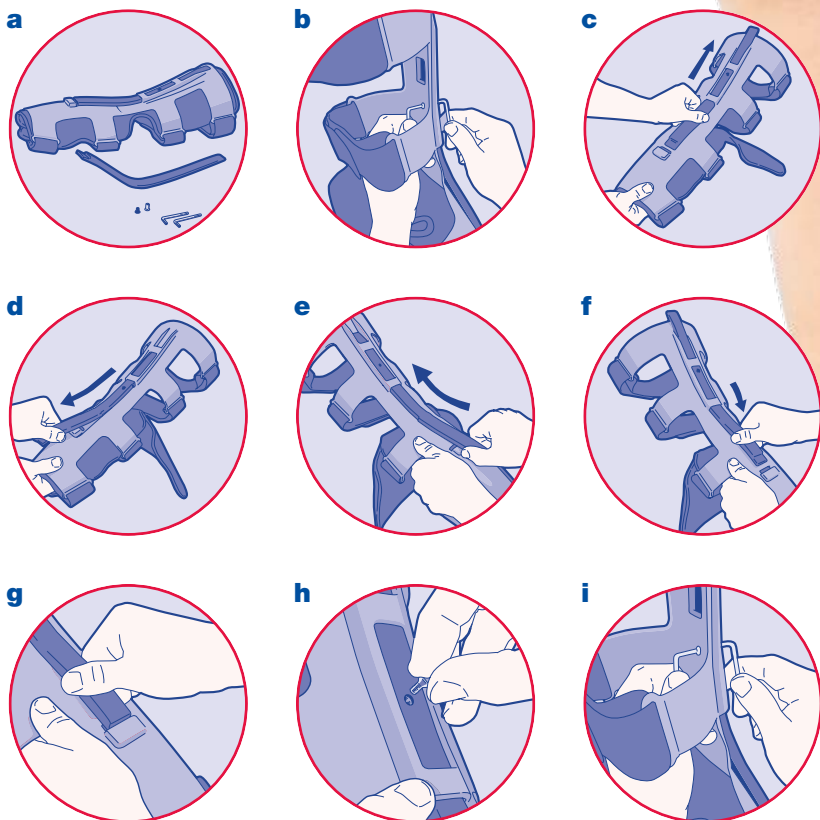

a Composants:

- Coque avec baleine de stabilisation prémontée à 0°
- Attelle de stabilisation à 20°
- Vis et écrou à douille à 6 pans creux
- Clé allen

Pour un angle d'immobilisation à 20°, suivre les étapes suivantes.

- b** Pour enlever l'attelle de stabilisation à 0°, desserrer la vis avec la clé allen et enlever la vis et l'écrou à douille à 6 pans.
- c-d** Faire glisser la baleine vers le haut pour la déloger de la butée inférieure puis retirer-la vers le bas.
- e** Placer l'attelle de stabilisation à 20°. Pour cela, insérer l'attelle dans les deux supports supérieurs.
- f-g** Tirer l'attelle vers le bas afin de l'introduire dans la butée inférieure.
- h-i** Fixer l'attelle en plaçant l'écrou à douille 6 pans face interne de l'orthèse en vissant face externe à l'aide de l'écrou et de la vis fournis.



Enfin une attelle rigide 0° ou 20°, taille universelle, efficace et simple!

Actimove® GenuStep

Attelle de genou articulée

- **Articulation polycentrique :**
mouvement naturel de genou possible, hyperextension et mouvements latéraux limités
- **Sangles auto-agrippantes élastiques :**
bonne adaptation au mouvement des muscles, maintien optimal



En indication...

- Gonarthrose douloureuse
- Pathologies chroniques du ménisque
- Instabilité légère des ligaments du genou
- Douleur chronique telle la gonarthrite rhumatoïde
- Support post-opératoire

En plus...

- Tissu respirant : échauffement et transpiration limités, respiration de la peau améliorée
- Ouverture au niveau du creux poplité : confort de port, évite la macération de la peau
- Finition plate au niveau des sangles
- Coloris noir : discret
- Lavable en machine à 30°C : pratique et hygiénique

Mise en place

1. Positionner le genou légèrement fléchi de manière à ce que la patella (rotule) se place dans la fenêtre avant de l'orthèse
2. Envelopper le genou en fermant la fixation inférieure puis la fixation supérieure
3. Serrer doucement la sangle auto-agrippante inférieure puis supérieure
4. Régler l'orthèse jusqu'à ce qu'elle soit confortablement ajustée.




aussi pour les juniors !

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63



Actimove® GenuStep

Taille	Circonférence	Code produit	ACL**	EAN13
XS	30 - 34 cm	73492-39	5203506	4042809176377
S	35 - 39 cm	73492-40	5203529	4042809377873
M	40 - 44 cm	73492-41	5203535	4042809377897
L	45 - 49 cm	73492-42	5203558	4042809377910
XL	50 - 54 cm	73492-43	5203570	4042809377934
XXL	55 - 59 cm	73492-44	5203601	4042809377958
XXXL	60 - 64 cm	73492-45	5203618	4042809377972

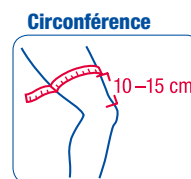

Conforme LPPR 2152211

Tarif de remboursement : 102,29 €
(tarif susceptible de modification)

Actimove® Genu Clips

Attelle rigide de genou avec fermeture à clips

- Enveloppement de la jambe et de la cuisse avec évidement rotulien préformée anatomiquement : bon maintien en place et confort du patient
- Deux baleines latérales amovibles et une baleine postérieure pré-formée conformables assurent la rigidité de l'attelle : s'adapte à la morphologie du patient
- Sangles à clips, facile d'utilisation
- Lavable en machine à 30°C : hygiénique et pratique



En indication...

- Immobilisation post-traumatique et/ou post-opératoire du genou en extension complète
- Fracture de rotule mineure
- Suite de procédures d'arthroscopie, de ligamentoplastie

Genu Clips se différencie par ses sangles à clips, facile d'utilisation.



En plus...

- Intérieur confortable en coton bouclettes
- Fermeture et réglage simples avec 4 bandes auto-agrippantes et boucles en D
- Rallonges de circonférence utiles pour les jambes fortes
- Disponible en taille pédiatrique
- Coloris bleu marine
- Pour la version Clips : mise en place par le patient très facile une fois réglée par un professionnel lors de la première pose



aussi pour les juniors !


Voir notre guide spécial «juniors» en page 63

Mise en place

1. Ouvrir l'attelle. Placer et refermer avec la fermeture avec bandes auto-agrippantes sur la partie centrale en mousse afin de couvrir totalement la circonférence de la jambe (un mètre à ruban peut être utile pour travailler avec plus de précision),
2. Placer la mousse autour de la jambe, l'extrémité la plus large de l'attelle orientée vers le haut du corps,
3. Moler les baleinages latéraux et postérieurs afin qu'ils épousent parfaitement la jambe. Centrer sur le genou l'ouverture aménagée pour la rotule,
4. Fermer l'attelle à l'aide des sangles placées à l'avant de la jambe. Commencer par la sangle supérieure, poursuivre avec la sangle inférieure pour terminer enfin par la sangle du milieu.

Actimove® Genu Clips

Taille patient	Hauteur	Circonférence	Code produit	ACL**	EAN13
< 1 m 20	30 cm	< 32 cm	73424-16	4284537	4042809165678
< 1 m 40	40 cm	< 40 cm	73424-17	4284543	4042809165692
< 1 m 60	50 cm	< 52 cm / S	73424-18	4284566	4042809165715
		45 - 65 cm / L	73424-19	4284572	4042809165739
< 1 m 80	60 cm	< 52 cm / S	73424-20	4284589	4042809165753
		45 - 65 cm / L	73424-21	4284595	4042809165777
> 1 m 80	70 cm	< 52 cm / S	73424-22	4284603	4042809165791
		45 - 65 cm / L	73424-23	4284626	4042809165814

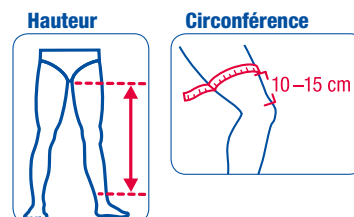

Conforme LPPR 2124338
Tarif de remboursement : 57,23 €
(tarif susceptible de modification)