

Actimove® Umerus Comfort

Écharpe d'immobilisation de l'épaule

- Sangle doublée au niveau du cou par un manchon de protection en mousse : limite les pressions au niveau des cervicales pour plus de confort
- L'enveloppe en tissu s'ouvre : contrôle des plaies possible sans retirer l'écharpe
- Bandes auto-agrippantes Y-Tabs : fermeture et réglage simples
- Lavable en machine à 30°C : pratique et hygiénique



En indication...

- Immobilisation du membre supérieur en position coude-au-corps dans la petite traumatologie de l'épaule, du bras et du coude avec ou sans fracture (fracture de l'humérus ou de la tête humérale non compliquée, fracture de l'omoplate, luxation de l'épaule)

En plus...

- Support léger et résistant : confort du patient
- Sangle circulaire postérieure réglable : position coude-au-corps assurée et adaptée
- Anneau de pouce : maintien de la main en position correcte
- Coloris bleu marine


Mise en place

1. Placer le coude et l'avant bras du membre lésé dans la poche de l'écharpe et positionner la bretelle en travers du dos en passant sur l'épaule valide.
2. Passer l'extrémité de la sangle dans la boucle et fermer l'attache.
3. Pour que l'écharpe soit correctement placée, veiller à ce que la main soit légèrement surélevée par rapport au coude. Pour éviter tout glissement du bras de l'enveloppe, placer le pouce dans la boucle de l'écharpe.
4. Placer la protection sur la bretelle, à l'endroit souhaité, au niveau du cou.
5. Ouvrir et libérer l'attache en Y de la sangle, puis ajuster ensemble les bretelles du cou et de la taille à la longueur nécessaire. Repositionner ensuite l'attache en Y sur les bretelles.



Actimove® Umerus Comfort

Taille	Avant-bras	Code produit	ACL**	EAN13
XS	< 33 cm	73423-11	7917925	4042809122763
S	33 - 38 cm	73423-03	7843730	4042809016512
M	38 - 43 cm	73423-04	7843747	4042809016543
L	42 - 48 cm	73423-05	7843753	4042809016604
XL	> 48 cm	73423-06	7843776	4042809016635

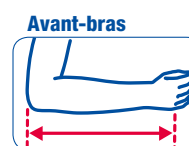

Conforme LPPR 1156684
 Tarif de remboursement : 15,24 €
 (tarif susceptible de modification)

Actimove® Rhizo Forte

Orthèse pour l'arthrose du pouce

**INNOVATION
PATIENT
BREVETÉE**



- Unique ! Un design fin et léger pour un grand confort de port
- Parfait équilibre entre fonctionnalité et immobilisation
- Se porte en continu même pendant le lavage des mains : l'hygiène du patient est respectée



reddot design award

En indication...

- Rhizarthrose
- Entorse de la colonne du pouce
- Pouce du skieur (hyper-extension)

En plus...

- Conception ouverte
- Corps en aluminium modelable
- Mobilité de la dernière phalange du pouce
- Mise en place uniquement sur la main, libère le poignet
- Permet le port de montre et bracelet
- Lavable en machine à 30°C



Ce schéma sur l'emballage du produit permet une mesure rapide et facilite la délivrance du modèle adapté au patient


Prise de mesure rapide (taille réelle)

L	L
M	M
S	S

Actimove® Rhizo Forte

Taille	Mesure	Code produit	ACL**	EAN13
GAUCHE				
S	4,5 - 5,4 cm	76238-13	-	4042809483734
M	5,5 - 6,3 cm	76238-15	-	4042809483772
L	6,4 - 7,3 cm	76238-17	-	4042809483819
DROITE				
S	4,5 - 5,4 cm	76238-12	-	4042809483710
M	5,5 - 6,3 cm	76238-14	-	4042809483758
L	6,4 - 7,3 cm	76238-16	-	4042809483796

Pour une prise de mesure exacte

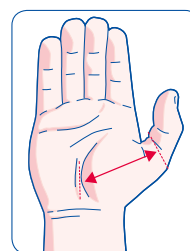

Conforme LPPR 2139943
 Tarif de remboursement : 43,32 €
 (tarif susceptible de modification)